

Guía de Inicio Rápido



Modelo: ABH-120




Para obtener instrucciones visuales detalladas, visite nuestro sitio web www.WearAndHear.com



1 Contenido del Paquete

- Auricular
- Cargador y cable
- Pares de ganchos (3 tamaños)
- Cubiertas de protección contra el viento (2 pares)
- Pares de olivas (variedad de tipos y tamaños)
- Funda de viaje



2 Auricular

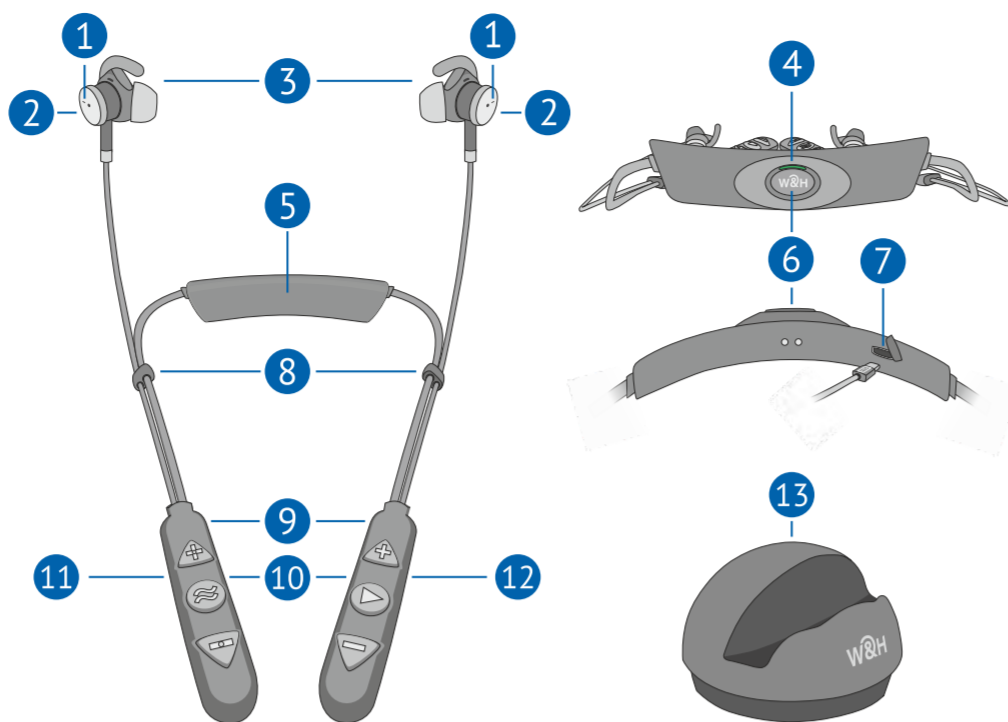

- 1 - Micrófonos
- 2 - Imanes para conectar los auriculares cuando no se utilizan
- 3 - Olivas y ganchos de silicona
- 4 - Indicador LED
- 5 - Banda collarín
- 6 - Botón de encendido
- 7 - Puerto de carga USB
- 8 - Clips para sujetar el cable
- 9 - Receptores de bobina T
- 10 - Micrófonos de caja de control
- 11 - Controles de asistencia auditiva
- 12 - Controles de Música/Llamada
- 13 - Base de carga


3 Carga de la batería

- Conecte el soporte de carga a la toma de corriente y coloque los auriculares en el soporte.
- El indicador LED esta en rojo durante la carga y se vuelve verde cuando el auricular está completamente cargado.
- Como alternativa, puede cargar los auriculares directamente desde un enchufe de pared o desde el puerto USB del ordenador.

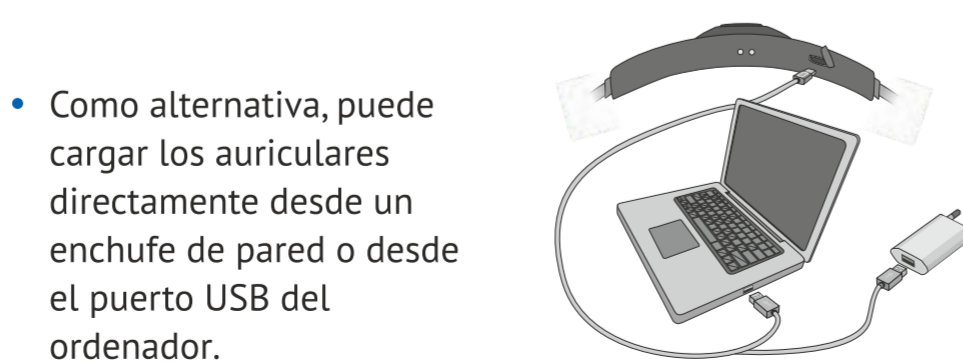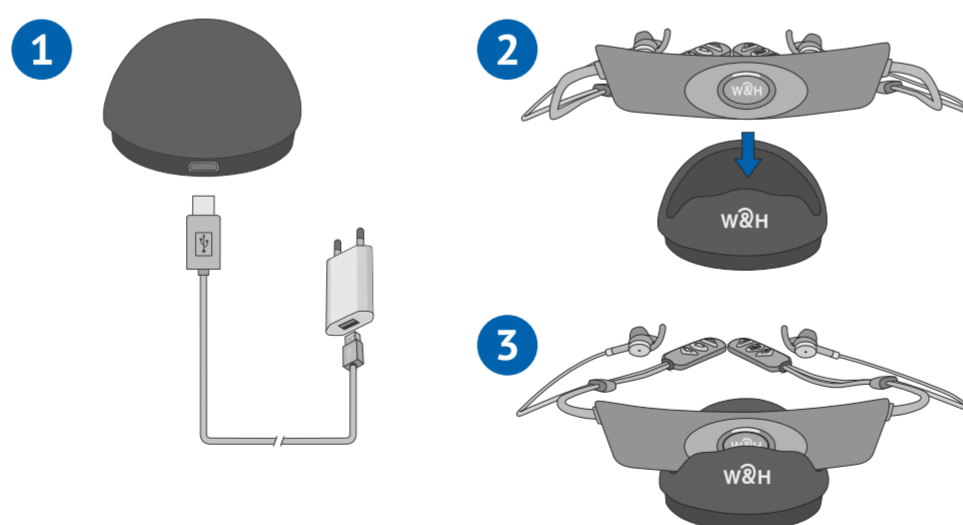

! Antes del primer uso, cargue la batería por un período de 3 horas o hasta que el indicador LED cambie a color verde.

4 Recomendaciones de uso

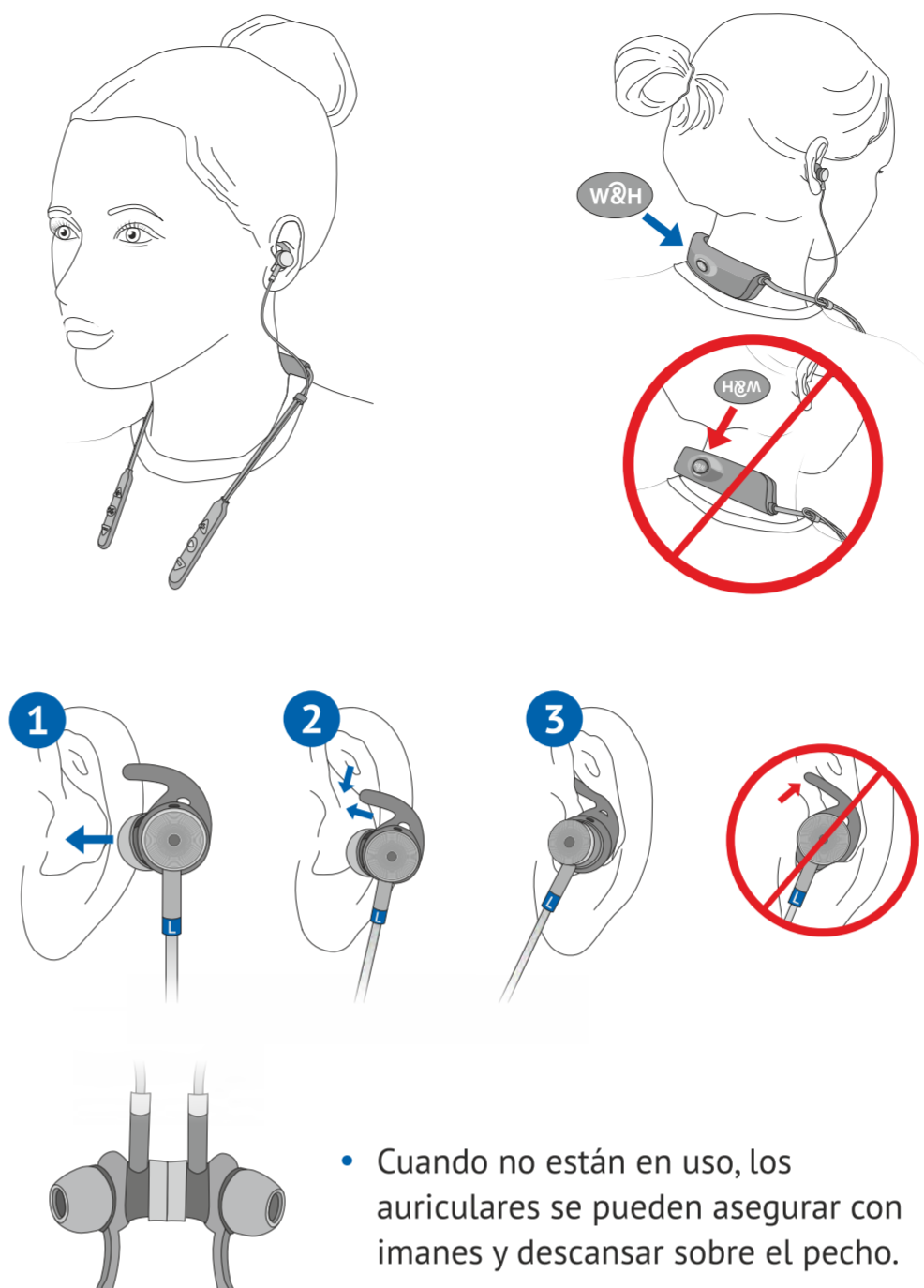

• Cuando no están en uso, los auriculares se pueden asegurar con imanes y descansar sobre el pecho.

5 Adaptadores para los oídos

- Si las olivas y ganchos predeterminados no son cómodos, retírelos. Elija un gancho de diferente tamaño y sujételo.
- Vuelva a colocar el auricular y apriételo suavemente para fijarlo al altavoz ovalado.
- Coloque cubiertas de espuma para reducir el ruido del viento (opcional).



6 Aplicación para Smartphone

Gestione, personalice y obtenga ayuda para sus auriculares BeHear con la aplicación **W&H BeHear** gratuita para smartphones.




7 Conectarse al teléfono

1. Descargue la aplicación **W&H BeHear** en Google Play Store o Apple Store e instálela en su teléfono.
2. Si BeHear está en ON, pulse el botón de encendido hasta que el LED se apague.
3. Presione el botón de encendido durante unos 5 segundos, hasta que el LED empiece a alternar entre el rojo y el azul.
4. Inicie la aplicación y siga las instrucciones.
5. Los auriculares serán identificados como **BeHear ACCESS** seguido de su número de serie.

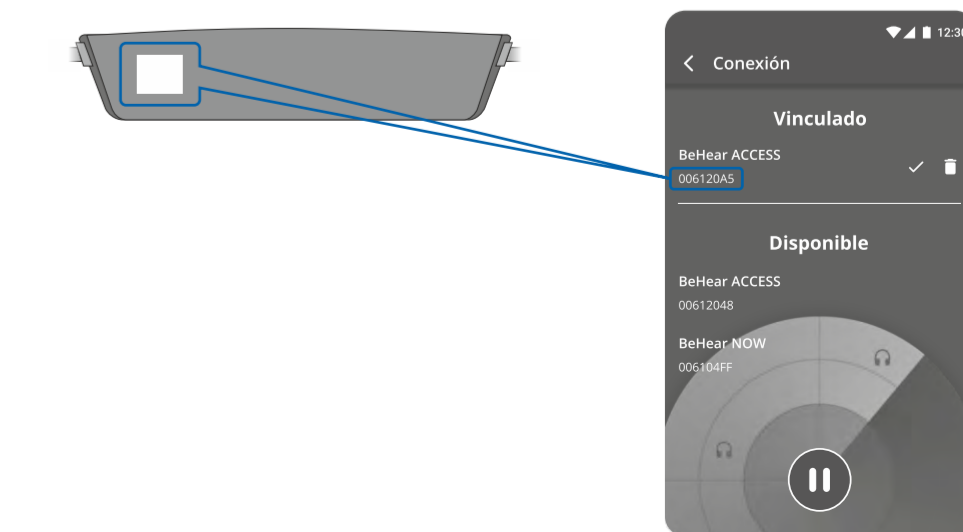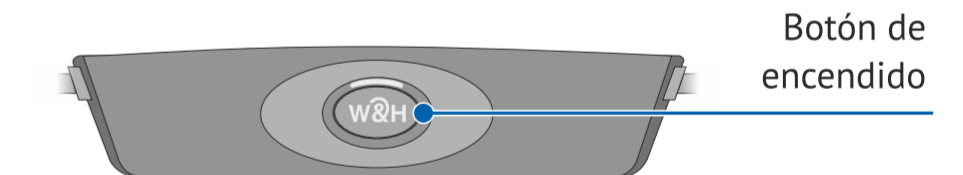

8 Amplificación Auditiva

Active la amplificación auditiva siempre que la necesite.

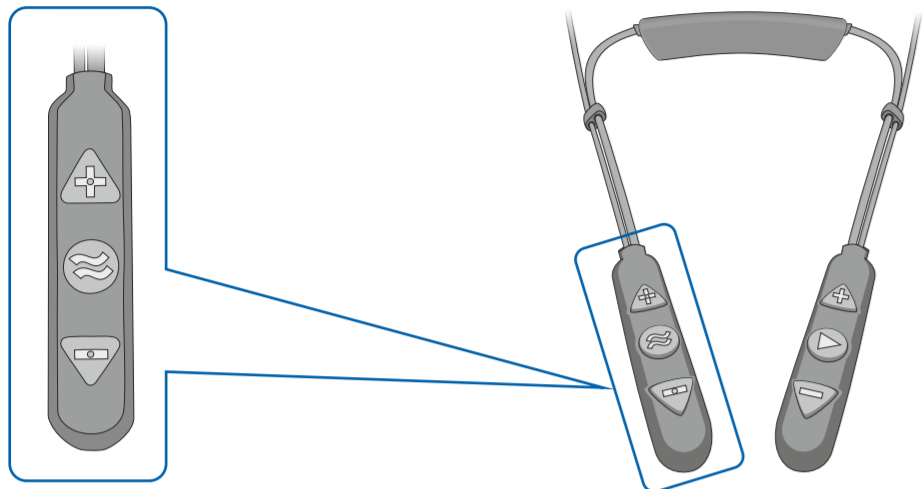

Presione durante mucho tiempo para activar o desactivar la amplificación auditiva.


Pulse brevemente para desplazarse por los perfiles de audición.

Aumentar el volumen auditivo.

Disminuir el volumen auditivo.

9 Receptores de bobina telefónica (bobina T)

Activar el modo de bobina cuando están presentes los bucles de inducción.

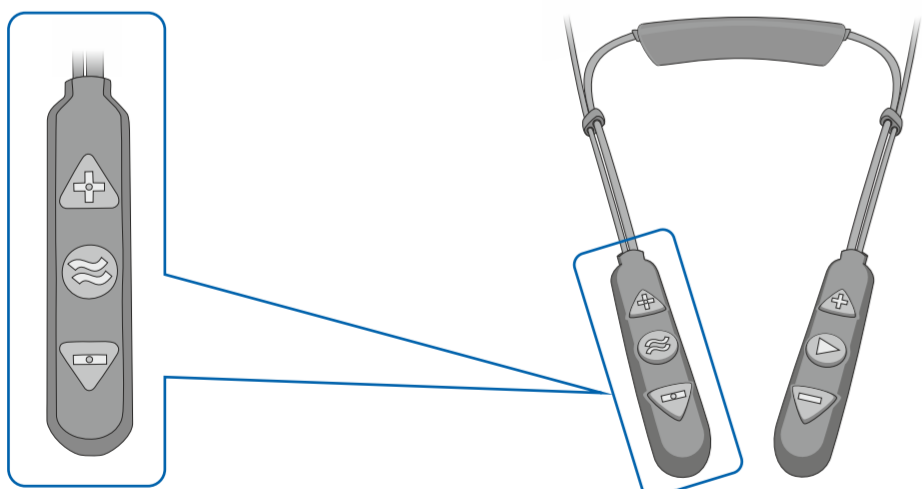

Pulse dos veces para activar el modo de bobina T ON/OFF.


Presione brevemente para alternar entre los perfiles de bobina T Exclusiva y Transparente.

Aumentar el volumen del receptor de bobina telefónica.

Disminuir el volumen del receptor de bobina telefónica.

10 Manejo de llamadas telefónicas

Gestionar las llamadas de un teléfono móvil con conexión Bluetooth mediante los mandos de la mano izquierda.

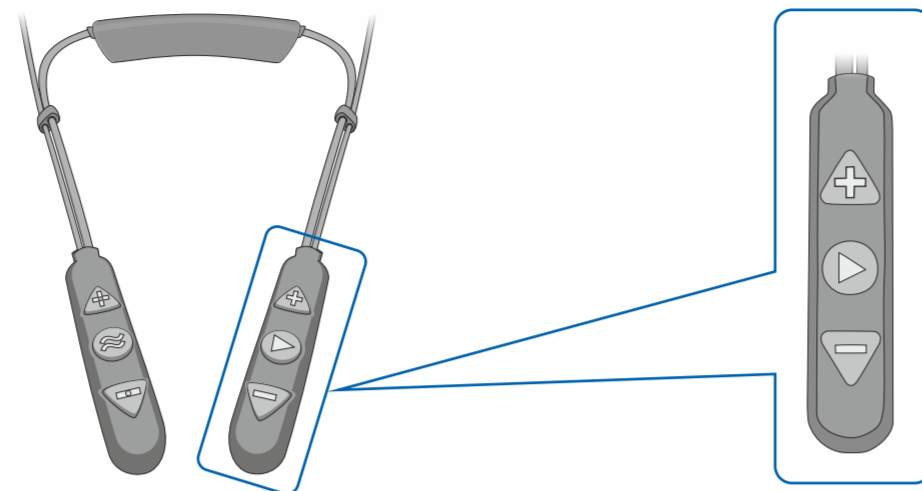

Pulse brevemente para aceptar la llamada entrante.

Pulse brevemente para finalizar la llamada activa.

Pulse durante mucho tiempo para rechazar una llamada entrante.


Pulse dos veces para volver a marcar el último número.

Aumentar el volumen de la llamada.

Disminuir el volumen de la llamada.

11 Disminuya la velocidad del habla con EasyListen™

Reduzca la velocidad de la voz entrante durante una llamada de teléfono móvil en curso utilizando los controles de la mano derecha.

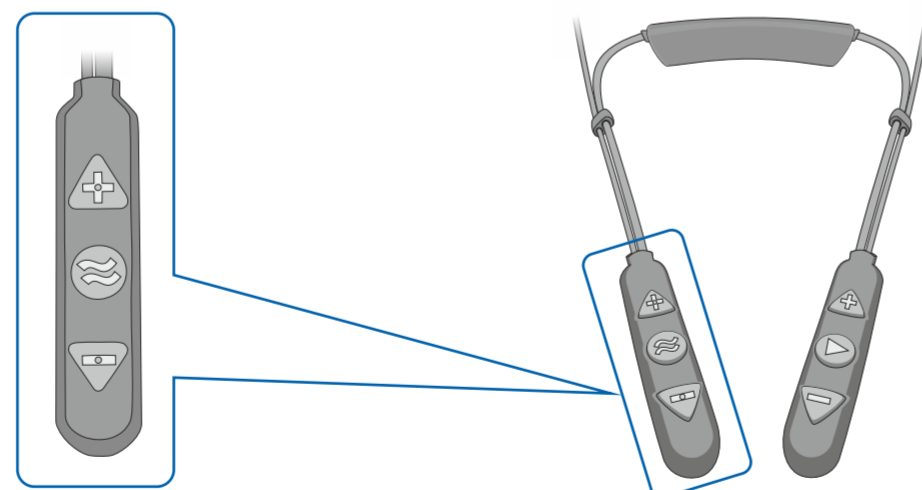


Presione durante mucho tiempo para activar EasyListen ON/OFF.

El tiempo del habla se ajusta a Normal cuando EasyListen está APAGADO.

Pulse brevemente para desplazarse por las tres opciones de tiempo: lento, más lento y el más lento.

12 Reproducción de audio

Gestione la reproducción de audio desde un dispositivo conectado a Bluetooth utilizando los controles del lado izquierdo.

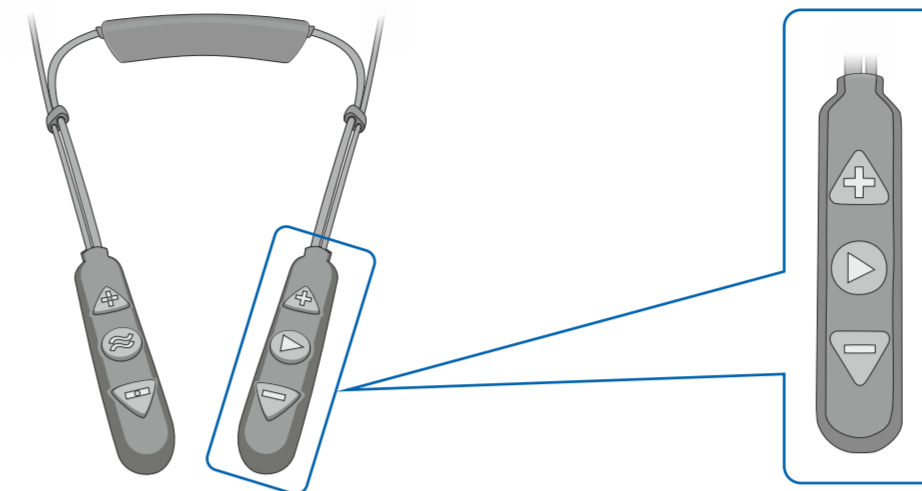

Pulse brevemente para cambiar entre Reproducir/Pausar audio.

Pulse dos veces para avanzar a la siguiente pista de audio.


Pulse tres veces para volver a la pista de audio anterior.

Aumentar el volumen.

Disminuir el volumen.

13 Manténgase a salvo y en alerta con ListenThrough™

Manténgase alerta con ListenThrough™ mientras escucha música usando los controles de la mano derecha.

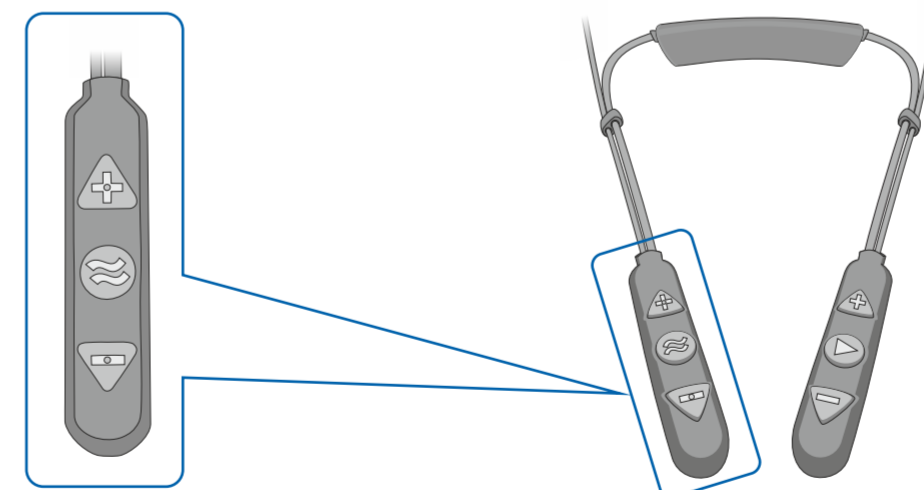


Pulsar largo tiempo para activar el modo de audición ON/OFF.

Aumentar el volumen del sonido ambiental.

Disminuir el volumen del sonido ambiental.

14 Indicaciones de estado LED

El indicador LED muestra los estados de alimentación y funcionamiento del auricular.

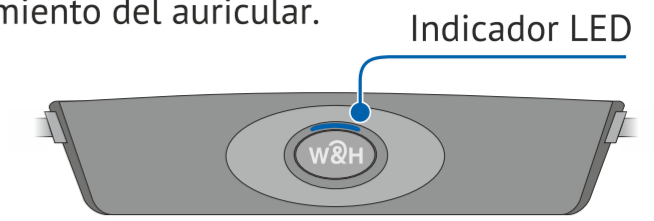

Indicación	Estado
• Luz azul	• El auricular se enciende y se apaga (alterna)
• Lila, parpadeando	• Función auditiva activa
• Rojo/azul alternando	• Modo de emparejamiento Bluetooth
• Rojo, parpadeando	• Desconectado del dispositivo Bluetooth emparejado o la batería está baja.
• Rojo, estable	• Cargando
• Verde, estable	• Batería completamente cargada
Si la unidad está encendida, pulse el botón de encendido brevemente:	Nivel de carga de la Batería:
• Verde	• Bueno > 50%
• Amarillo	• Aceptable > 10% y < 50%
• Rojo, parpadeando	• Bajo < 10% (¡necesita que lo carguen!)

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

FCC ID: 2AM3SABH-120

Declaración de cumplimiento de la UE

Alango Technologies Ltd. declara por la presente que este dispositivo inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva R&TTE. Una copia de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en www.wearandhear.com/compliance.

Unión Europea – Información sobre eliminación

El símbolo anterior significa que, de acuerdo con las leyes y normativas locales, su producto y/o su batería deben desecharse separadamente de la basura doméstica. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje de su producto y/o su batería en el momento de su eliminación ayudará a conservar los recursos naturales y a garantizar que se recicla de manera que se proteja la salud humana y el medio ambiente.