


Guía de Inicio Rápido

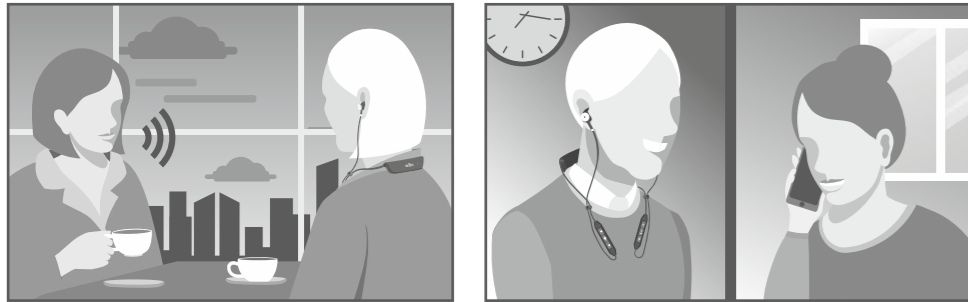

Modelo: ABH-101



Para instrucciones visuales detalladas visite nuestra página web www.WearAndHear.com

Wear&Hear

1 Contenido del Paquete

- Auricular
- Funda de viaje
- Pareja de ganchos para oído (3 tallas)
- Parejas de olivas para oído (variedad de tipos y tamaños)
- Cubiertas protectoras de viento (2 pares)
- Cable de carga


2 Auricular



- 1 - Micrófonos
- 2 - Imanes para conectar los auriculares cuando no se usan
- 3 - Olivas y ganchos de siliconas para los oídos
- 4 - Banda Collarín
- 5 - Clips de sujeción de cables
- 6 - Controles de asistencia auditiva
- 7 - Controles de Música/Llamada
- 8 - Indicador LED
- 9 - Botón de encendido
- 10 - Puerto de carga USB

3 Cargar la Batería


- Cargue el auricular directamente de un enchufe o del puerto USB del ordenador.
- El indicador LED está en rojo durante la carga y se pone verde cuando esta finaliza.

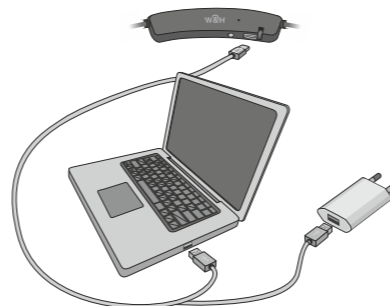

Antes del primer uso, cargue la batería por 3 horas o hasta que el indicador LED pase a color verde.

4 ON y OFF del Auricular

1. Para encender BeHear NOW mantenga presionado el botón de encendido hasta que vibre y el LED cambie a luz azul.
2. Para apagar BeHear NOW mantenga presionado el botón de encendido hasta que vibre y el LED se apague.

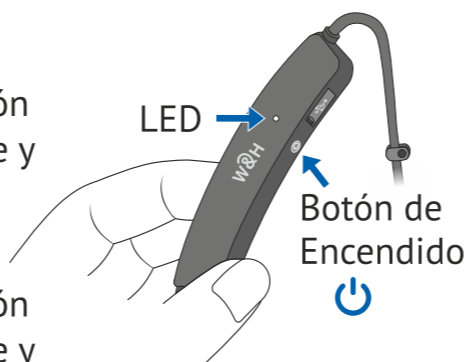


5 Recomendaciones para su colocación




Cuando no está en uso, los auriculares se aseguran con imanes descansando sobre el pecho.

6 Ajustes en el oído

- Las olivas y los ganchos que vienen por defecto pueden no ser cómodos para usted.
- Elija los que mejor le ajusten.

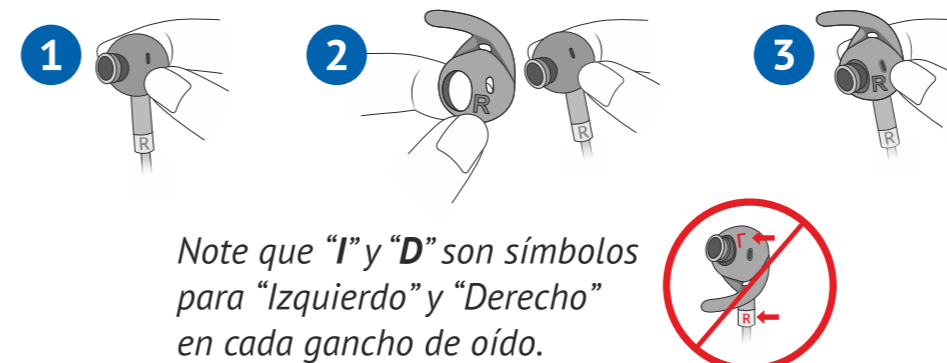

- Vuelva a colocar el auricular y apriételo suavemente para fijarlo al altavoz ovalado.
- Coloque cubiertas de espuma para reducir el ruido del viento (opcional).

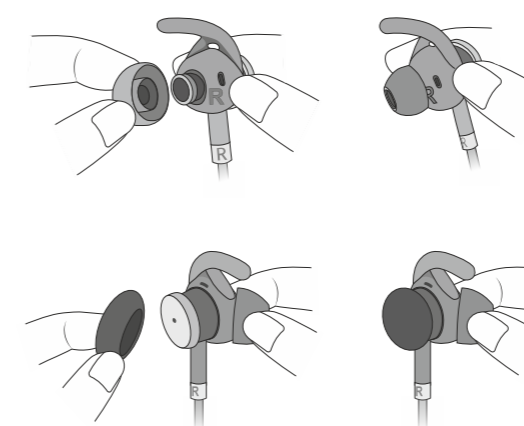

7 Aplicación para Smartphone

Maneje, personalice y obtenga ayuda para su auricular BeHear con la aplicación gratuita **W&H BeHear**.




Descargue la APP **W&H BeHear** desde Google Play Store o Apple Store e instálela en su teléfono.




8 Conectar con el teléfono

1. Apague el auricular BeHear NOW.
2. Presione el botón de encendido otra vez por 5 segundos hasta que el indicador LED alterne colores rojo/azul.
3. Inicie la aplicación y siga las instrucciones.
4. El auricular será identificado como **BeHear NOW** seguido por su número de serie.

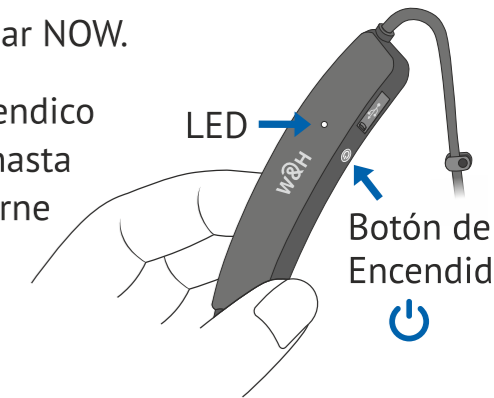

9 Amplificación Auditiva

Encienda el servicio de amplificación auditiva siempre que lo necesite.

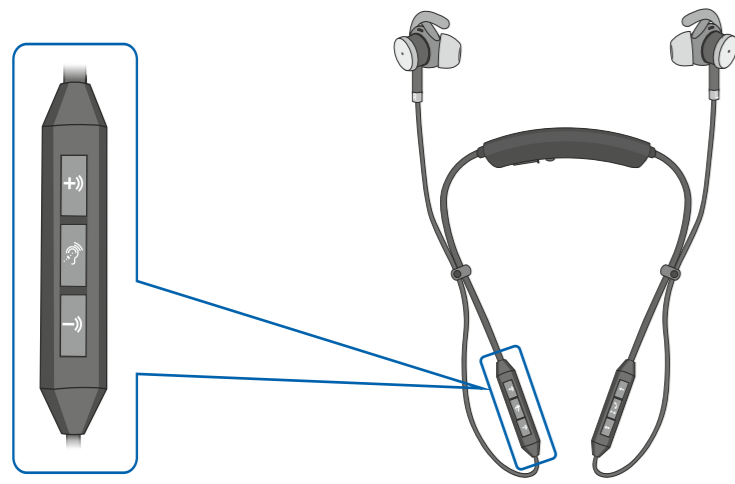


- Presione durante** un tiempo para activar la amplificación auditiva ON/OFF.
- Pulse brevemente** para desplazarse por los perfiles de audición.
- Aumentar** el volumen de audición.
- Disminuir** el volumen de audición.

10 Personalización


Ajuste el rendimiento acústico del auricular a sus preferencias personales de audición.

- Colóquese los auriculares en el oído.
- Seleccione **Personal** -> **Evaluación** en la app W&H BeHear.
- Siga las instrucciones para realizar la evaluación auditiva.
- Guarde y aplique los resultados.

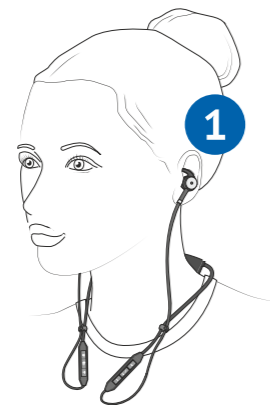

11 Manejo de llamadas telefónicas


Maneje las llamadas de un teléfono móvil con conexión Bluetooth utilizando los controles de la mano izquierda.

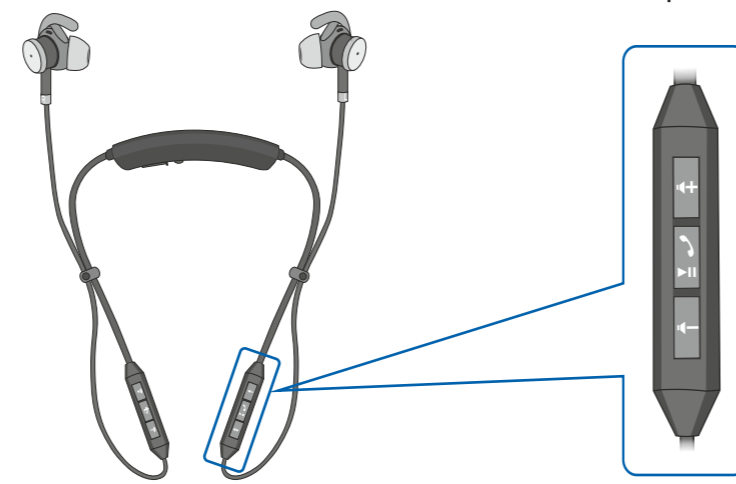

- Pulse breve** para aceptar una llamada.
- Pulse breve** para finalizar una llamada.
- Pulse largo** para rechazar una llamada.
- Pulse doble** para rellamar el último número.
- Aumentar** el volumen de la llamada.
- Disminuir** el volumen de la llamada.

12 Reduzca la velocidad del habla con EasyListen™


Reduzca la velocidad de la voz entrante durante una llamada telefónica en curso utilizando los controles de la mano derecha.

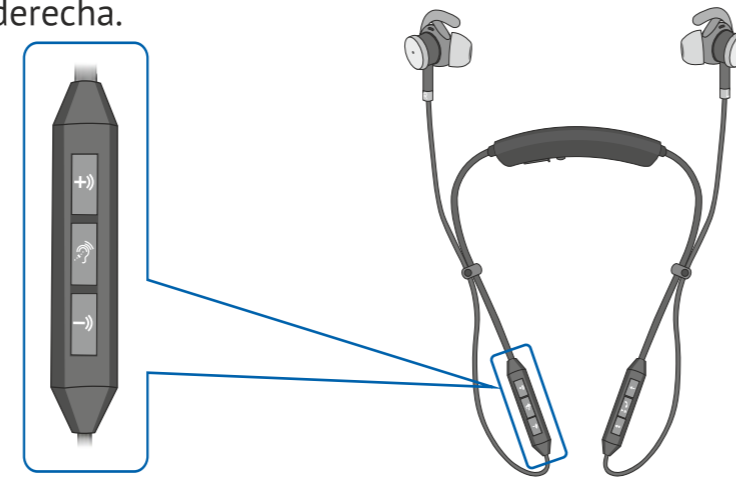

- Presione largo** para activar EasyListen ON/OFF. El tiempo del habla se ajusta a Normal cuando EasyListen está APAGADO.
- Presione breve** para desplazarse por las tres opciones de tiempo: Lento, más lento y el más lento.

13 Reproducción de Audio


Gestionar la reproducción de audio desde un dispositivo conectado a Bluetooth utilizando los controles de la mano izquierda.

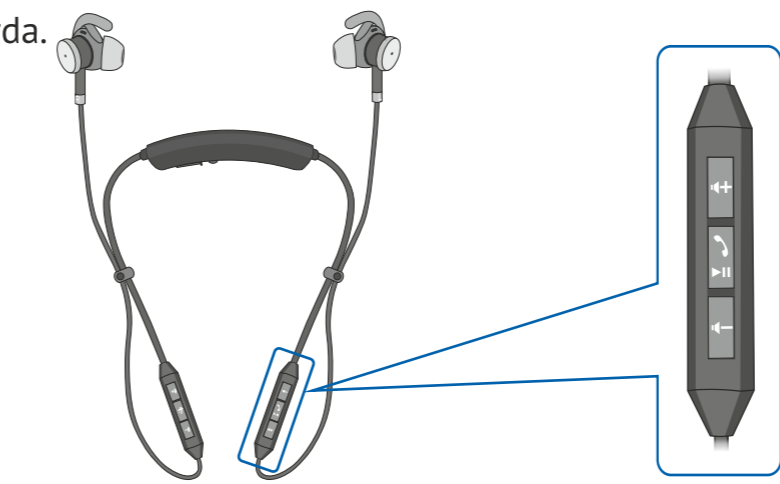

- Presione breve** para alternar Reproducir/Pausar audio.
- Presione dos veces** para avanzar a la siguiente pista de audio.
- Pulse tres veces** para volver a la pista de audio anterior.
- Aumentar** el volumen.
- Disminuir** el volumen.

14 Manténgase seguro y alerta con ListenThrough™

Manténgase alerta con ListenThrough™ mientras escucha música usando los controles de la mano derecha.

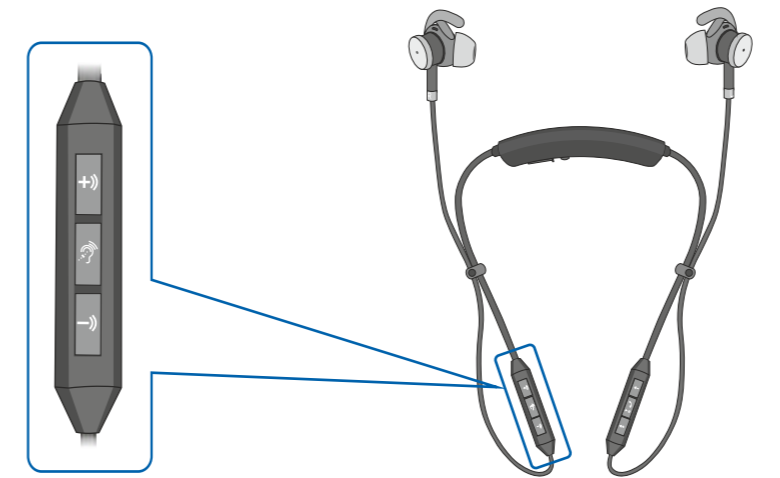

- Presione largo** para activar ListenThrough ON/OFF.
- Aumentar** el volumen del sonido del medio ambiente.
- Disminuir** el volumen del sonido del medio ambiente.

15 Indicaciones del estado del LED

El indicador LED muestra el encendido y el estado de las operaciones del auricular.

Indicación	Estado
• Luz azul	• Auriculares están activos ON/OFF
• Lila, parpadeando	• Función de audición activa
• Rojo/azul alternando	• Bluetooth modo paridad
• Rojo, parpadeando	• Desconectada paridad de Bluetooth o batería baja.
• Rojo, fijo	• Cargando
• Verde, fijo	• Batería cargada
Si la unidad está encendida, presione breve el botón de encendido:	Nivel de la Batería:
• Verde	• Bueno > 50%
• Amarillo	• Razonable > 10% y < 50%
• Rojo, parpadeando	• Bajo < 10% (necesita carga)

16 Solución de problemas

Si sus auriculares BeHear NOW se comportan de forma inesperada:

- Reinicie el auricular conectándolo al cargador. Se conservarán todos los datos de configuración y de conexión.
- Para reiniciar los auriculares BeHear NOW y restaurar la configuración original de fábrica:
 - Encienda los auriculares BeHear NOW.
 - Mantenga pulsados estos tres botones simultáneamente durante aproximadamente 8 segundos hasta que el LED amarillo parpadee una vez.
 - El auricular se apagará automáticamente.
 - Encienda los auriculares.

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

• FCC ID: 2AM3SABH-101

Declaración de Cumplimiento de la UE

Alango Technologies Ltd. declara que este dispositivo inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva R&TTE. Una copia de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible at www.wearandhear.com/compliance.

Información sobre eliminación en la UE

El símbolo anterior significa que, de acuerdo con las leyes y normativas locales, su producto y/o su batería deben desecharse separadamente de la basura doméstica. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévalo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida y el reciclaje por separado de su producto y/o su batería en el momento de su eliminación ayudará a conservar los recursos naturales y a garantizar que se reciclen de manera que se proteja la salud humana y el medio ambiente.