


BeHear[®]
ACCESS

HearLink[®]
PLUS

PAQUETE

Guía de Inicio Rápido

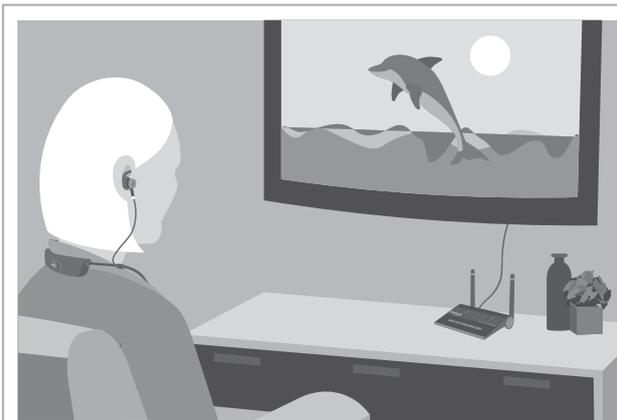


Para más información
visite nuestra Web site
www.WearAndHear.com

Wear & Hear

1 Ajuste de BeHear ACCESS

Conecte la base de carga a una fuente de alimentación (puerto USB del ordenador o enchufe de pared mediante un adaptador, adquirido por separado) y coloque los auriculares en la base.

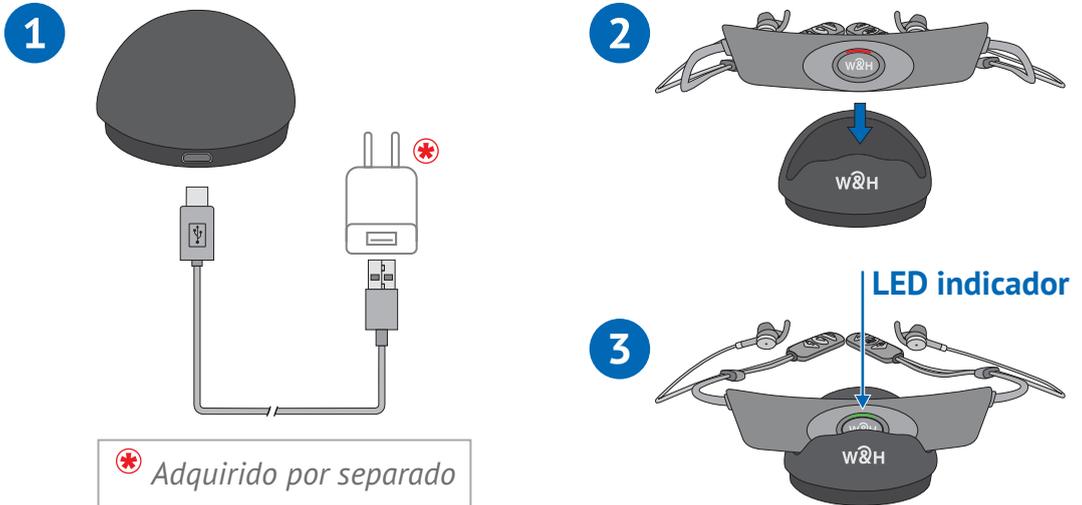


El indicador LED del auricular está en color rojo durante la carga y se pone en color verde cuando el auricular está completamente cargado.



Antes del primer uso, cargue la batería durante 3 horas hasta que el indicador LED se ponga de color verde.


Para encender BeHear ACCESS presione y mantenga el botón de encendido aproximadamente 3 segundos hasta que la unidad vibre y el LED se ilumine en color azul.

Para apagar BeHear ACCESS presione y mantenga el botón de encendido aproximadamente 3 segundos hasta que la unidad vibre y el LED de color azul claro se apague.

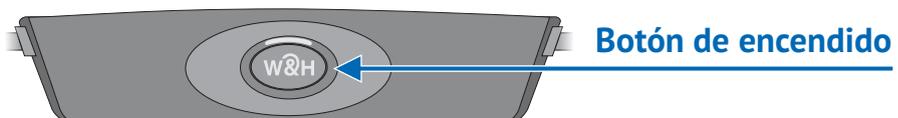


2 Ajuste de HearLink PLUS


1. Conecte HearLink PLUS a la toma de corriente(A) o a la TV mediante el puerto USB(B) utilizando el cable suministrado. HearLink PLUS se encenderá automáticamente.

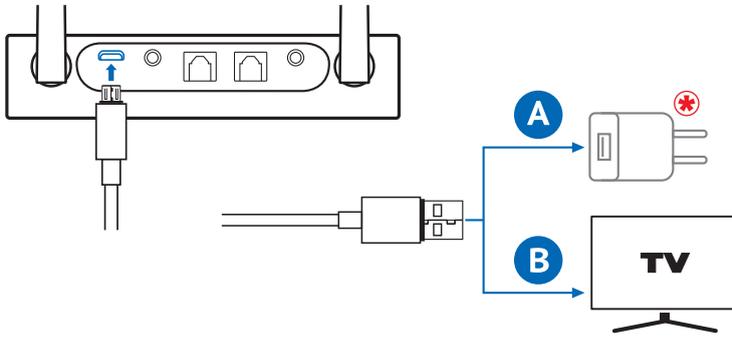

2. Coloque el interruptor en la posición TX.

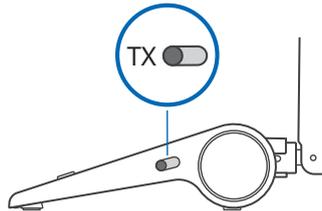

3. Conecte el puerto HearLink PLUS TX al televisor (u otro dispositivo) utilizando el cable óptico o de audio de 3,5 mm suministrado. El modo de conexión activa se indica con el texto iluminado HearLink PLUS TX (**OPT** o **AUX**) en el panel de visualización frontal del HearLink PLUS.

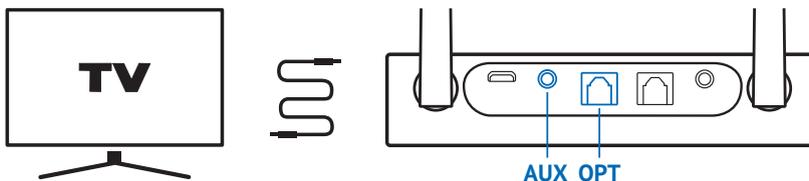

Asegúrese de quitar los protectores de plástico de los terminales del cable óptico antes de insertarlos.

3 Conexión por primera vez


1. Ponga **HearLink PLUS** en modo de emparejamiento con una breve pulsación de su botón .

Cuando está en modo emparejamiento la luz del indicador **TX** parpadea rápidamente.

2. Si **BeHear ACCESS** está encendido, presione el botón de encendido  hasta que el LED se apague.

Presione el botón de encendido  por 5 segundos hasta que el LED parpadea entre color rojo/azul.

3. Coloque el auricular BeHear ACCESS cerca del dispositivo HearLink PLUS.

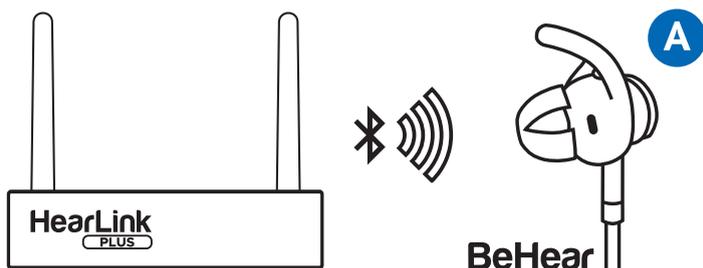

4. Cuando el emparejamiento se complete (después de 5-30 segundos) **TX** se iluminará en el panel frontal del HearLink PLUS.

La **LL** se ilumina para indicar que se está utilizando el CODEC Bluetooth APTX-LL de baja latencia.

La conexión correcta de los auriculares BeHear ACCESS se indica con la **A** iluminada en el panel frontal del HearLink PLUS.

4

Reproducción de Audio

1. Manual de Control del HearLink PLUS



Pulsación corta para cambiar **Reproducción/Pausa** del audio.



Presione para **augmentar** el volumen. Se escucha un tono cuando se alcanza el volumen máximo.



Presione para **disminuir** el volumen. Se escucha un tono cuando se alcanza el volumen mínimo.

2. Control Remoto de BeHear ACCESS

Maneje la reproducción de audio usando los controles de la mano izquierda del auricular



Pulsación corta para cambiar entre **Reproducción/Pausa** el audio.



Presione para **Aumentar** el volumen



Presione para **Disminuir** el volumen.



Presione brevemente ambos botones simultáneamente para alternar entre dos fuentes de audio conectadas (por ejemplo, HearLink PLUS y un smartphone).


5 Información Útil

1. Si usted quiere escuchar audio:

- Asegúrese de que el puerto de "salida de audio" de su TV (u otro dispositivo) conectado al HearLink PLUS esté activo. En algunos dispositivos es necesario habilitar la salida de audio. Consulte el manual de usuario de su dispositivo.
- Cambie el botón de reproducción/pausa  en los auriculares BeHear o  en el HearLink PLUS.
- Alternar entre las fuentes de audio conectadas con pulsaciones cortas simultáneas en los auriculares  y  botones del BeHear.

2. Si la conexión automática se retrasa, una breve pulsación del botón de encendido del auricular BeHear ACCESS lo reconectará a un transmisor y/o smartphone HearLink PLUS previamente emparejado.

3. Use el modo **Bypass** de HearLink PLUS para mantener las interfaces existentes entre su TV y el equipo de audio periférico.

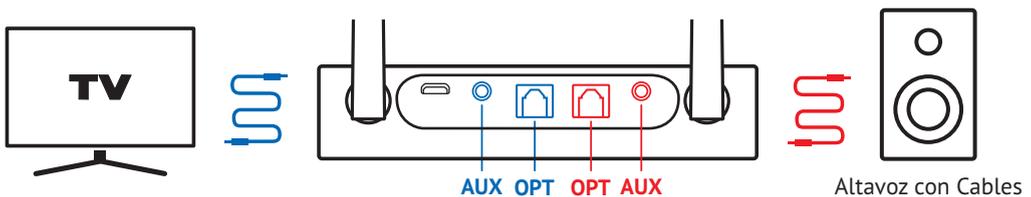

Conecte el puerto HearLink PLUS **TX** al televisor a través del cable óptico o de audio de 3,5 mm, y el puerto **RX** a un altavoz u otro equipo de audio periférico, utilizando el mismo tipo de cable que la conexión del puerto TX.

Para pasar a través de HearLink PLUS ponga su interruptor de modo en la posición Bypass, indicada por . Para restablecer la conexión con el auricular BeHear ACCESS, ponga el interruptor en modo TX.