

HearLink™

Audición Asistida por Bluetooth
Transmisor de Televisión (TV)



Guía del Usuario


*Mejoramiento del sonido por
Alango Technologies, Ltd.*

Wear & Hear
www.WearAndHear.com

HearLink es un dispositivo simple que se conecta al puerto de salida de sonido analógico que se encuentra en la mayoría de los televisores estándar. El uso de Bluetooth® envía la señal de audio al auricular Wear & Hear BeHear® (se vende por separado), que se puede personalizar fácilmente para adaptarse a las capacidades auditivas y preferencias del usuario. HearLink puede conectarse a dos unidades de BeHear simultáneamente.

Por favor leer esta guía del usuario antes de utilizar el producto.

Visión General

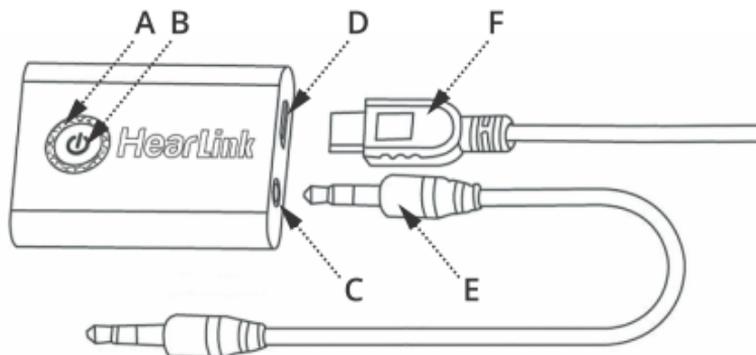

A - Indicador LED

B - Botón de Múltiples Funciones (MFB)

C - 3,5mm puerto Aux-in

D - Puerto de cargar Micro USB

E - Cable del Audio

F - Cable de cargar USB

Especificaciones

No. De Modelo	BTI-015A
Versión Bluetooth	V4.1, Clase II
Perfil Bluetooth	A2DP, AVRCP
Juego de fichas Bluetooth	CSR Bc8670
Flujo doble	HearLink puede conectar dos auriculares Bluetooth al mismo
Audios compatibles CODECs	APTX-LL, APTX - primera prioridad, únicamente para flujo simple De SBC — segunda prioridad, cambia automáticamente a flujo doble
Batería	160mAH batería de litio recargable
Tiempo de trabajo	Hasta 8 horas
Tiempo de carga	Aproximadamente 2 horas
Fuente de carga	CSR T300mA
Temperatura de Operación	-10 a +55°C (14 a 131°F)
Peso neto	14,5 gramos (0,5 oz.)
Dimensiones	6mm x 33.2mm x 9.7mm

Indicaciones LED

Encendido	LED Azul parpadea dos veces
Emparejamiento	LED azul y rojo parpadeo alternativamente
Desconectado modo de espera	LED azul destella dos veces cada 5 segundos
Modo de espera conectado	Modo de espera LED azul
Poca batería	LED rojo destella 3 veces (cuando siendo usado)
Cargando	LED rojo estable
Completamente cargado	LED rojo desactiva

Contenido del Pack

- DispositivoHearLink
- USB cable de carga
- 3,5mm cable audio de estéreo
- 2xRCA cable audio de estéreo
- Esta guía del usuario

Operación básica

1. Encendido

Presione el botón MFB durante unos 3 segundos para encender la unidad. Una vez que HearLink se encienda el LED azul parpadea dos veces.

Advertencia: *No encienda la unidad durante 3 segundos después de apagarlo.*

2. Apagado

Presionar el botón MFB durante unos 3 segundos. Una vez que HearLink se apaga el LED rojo parpadea 3 veces.

Observación: *HearLink se apagará automáticamente cuando la batería esta baja.*

3. El uso mientras se carga

HearLink sigue funcionando con normalidad mientras que se carga. El LED rojo está encendido mientras que la batería está cargando.

Observación: *Conexión del cargador en HearLink.*

4. Emparejando con el Auricular BeHear

Cuando HearLink esté encendido hacer doble clic en el botón MFB. Los LED azul y rojo parpadean alternativamente mientras la unidad entra en el modo de emparejamiento.

Introduzca el auricular BeHear en modo de emparejamiento. Coloque el auricular cerca de HearLink durante

aproximadamente 30 segundos. HearLink se conectará con BeHear automáticamente.

Observación: *Si su lista de emparejamiento está vacía, HearLink entrará en el modo de emparejar de forma automática cuando se encienda.*

5. Conexión con los últimos Dos Auriculares Conectados

HearLink se conectará automáticamente con los dos últimos auriculares conectados. Una vez que se establece la conexión, el LED rojo destellará una vez si está conectado con un dispositivo, o dos veces si está conectado con dos dispositivos simultáneamente.

Observación: *La operación de conexión puede tardar hasta 30 segundos.*

6. Borrando la lista de Emparejamiento

Cuando HearLink está en el modo de emparejamiento haga doble clic en el botón MFB. Los LED azul y rojo se iluminarán durante aproximadamente 1 segundo después de que la lista de emparejamiento se ha despejado. Entonces HearLink entrará en el modo de emparejamiento de forma automática, con los LED azul y rojo destellando alternativamente.

7. Reconfigurando HearLink

Para reconfigurar conectarlo al cargador en cuanto se presione el botón MFB.

Cómo Usar HearLink

Escuchar la televisión mientras utiliza HearLink y BeHear

1. Emparejar y conectar el auricular BeHear con HearLink.
2. Dependiendo de la configuración de hardware de la TV, elija o de 3,5 mm o 2xRCA suministrado en el pack HearLink.
3. Enchufe un extremo del cable de audio al conector de salida de audio de la TV y el otro lado al HearLink.
4. El audio de la TV debe ahora ser oído en el auricular BeHear.

Observaciones:

1. *Puede pausar y reanudar el audio de la TV alternando el botón de pausa/reanudar de los auriculares BeHear conectados. El sonido de la TV hará una pausa y reanudará en consecuencia.*
2. *El audio de la TV se detendrá automáticamente si una llamada entrante es recibida por un teléfono inteligente conectado al auricular BeHear. El audio de la TV se reanudará en el auricular hasta que la llamada se ha completado o es rechazado.*

Usando HearLink Simultáneamente con Dos Auriculares BeHear

HearLink puede ser usado para transmitir audio de la TV simultáneamente con dos auriculares BeHear.

1. Empareja y conecta el primer auricular BeHear con HearLink.
2. Empareja y conecta el segundo auricular BeHear con HearLink.
3. Dependiendo de la configuración de hardware de la TV, elija el cable de audio de 3,5 mm o 2xRCA suministrado en el pack HearLink.
4. Enchufe un extremo del cable de audio al conector de salida de audio de la TV y el otro lado en HearLink.
5. El audio de la TV debe ahora ser escuchado en ambos audífonos BeHear conectados.

Observación: *Puede pausar y reanudar el audio de la TV al alternar entre el botón de pausar/reanudar en cualquier auricular conectado a BeHear. El sonido pausará y reanudará en ambos auriculares simultáneamente.*

Información sobre la batería

HearLink es alimentado por una batería recargable. El rendimiento óptimo de una batería nueva sólo se consigue después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga correctos. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Si no se utiliza, una batería totalmente cargada perderá energía a medida que pasa el tiempo.

Se recomienda mantener la batería a una temperatura entre 15°C y 25°C (59°F y 77°F). El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No desechar las pilas en el fuego ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si están dañadas.

Solución de Problemas

Si no hay son en los auriculares BeHear:

1. Garantizar que los cables HearLink están los tres manera y volumen de la TV es suficientemente alto.
2. Mientras que lleva puesto el auricular BeHear conectado, desconecte el cable de audio de la unidad HearLink y toque la parte metálica en el extremo del cable con el dedo.
3. Cuando la conexión se realiza correctamente y el volumen del auricular es lo suficientemente alto, se oirá un sonido "zi zi". Significa que HearLink y el(los) auricular(es) BeHear y los cables están funcionando correctamente. En este caso, es la fuente de audio de la TV que es defectuoso.

Para cualquier otro tipo de comportamiento inesperado, restablecer el dispositivo HearLink conectándolo al cargador mientras presionando el MFB.