

behear.smarto

Усилитель слуха



Модель: АВН-410

Краткое руководство пользователя

BeHear SMARTO — это простой, но мощный персональный усилитель слуха с возможностью подключения по Bluetooth®, который поможет вам слышать мир!

А. Начало работы

1. Что в коробке?



Основной блок



Подставка для зарядки



Накладная гарнитура



Вставная гарнитура



Кабель для зарядки





Пары вкладышей (разных типов и размеров)




Шнурок

2. Выберите и подключите гарнитуру

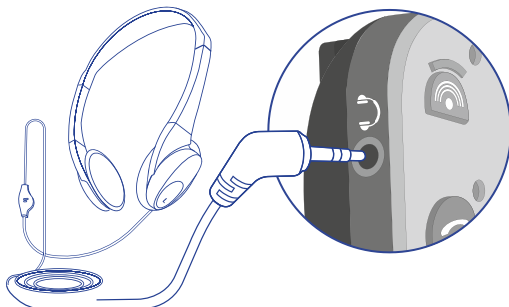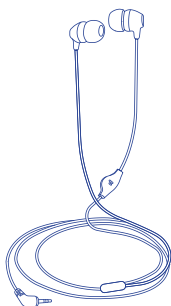

3. Наденьте гарнитуру

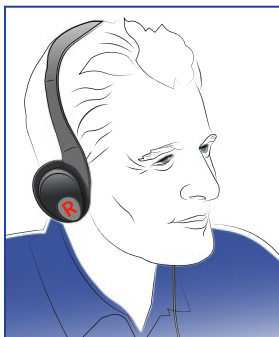

«L» - левое ухо
«R» - правое ухо

4. Закрепите устройство (опционально)

С помощью шнура



С помощью зажима



В. Основные действия

▶ ВКЛ/ВЫКЛ



Включить:

Сдвиньте кнопку питания вверх и удерживайте ее, пока устройство не завибрирует, а светодиодный индикатор не замигает **зеленым**




Выключить:

Сдвиньте кнопку питания вверх и удерживайте ее, пока устройство не завибрирует, а светодиодный индикатор не замигает **красным**.




▶ Громкость*

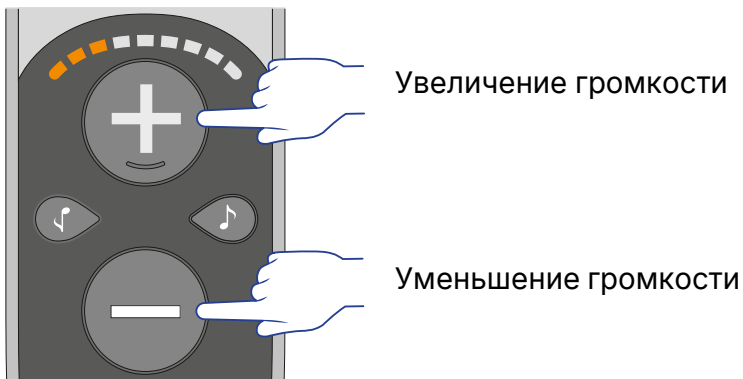


* Поддерживаются три различных диапазона громкости.
Подробности см. на стр. 8.

▶ Тон

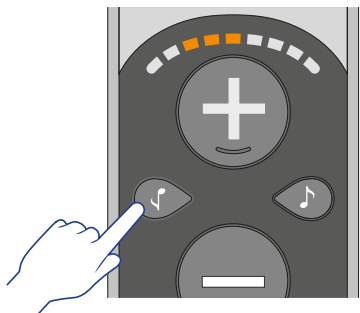

Увеличение
низких частот



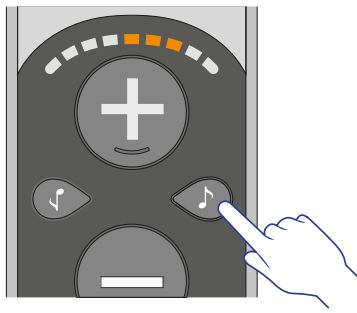


Увеличение
высоких частот

С. Расширенные функции

► Фокусировка звука


Переключение между режимами **Omni** (все направления) и **Front** (вперед).

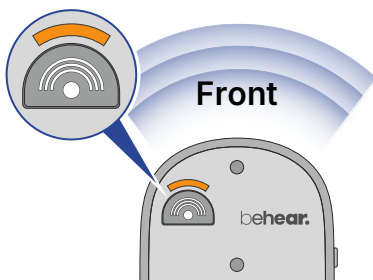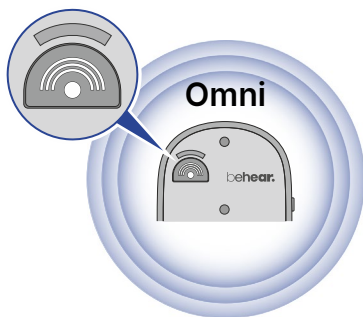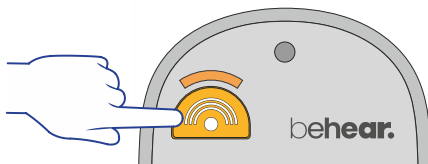



В режиме **Front** направьте SMARTO на источник звука.

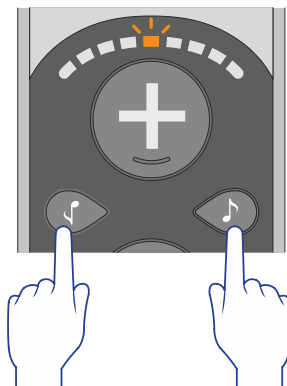


▶ Баланс




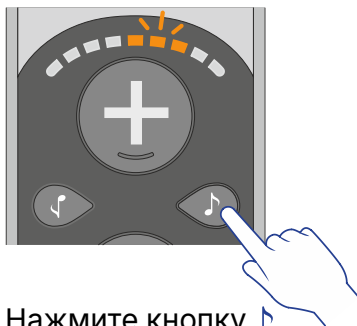
Нажмите и удерживайте кнопки  и  одновременно в течение 5 секунд, пока шкала громкости не начнет мигать.




Пока мигает шкала громкости:

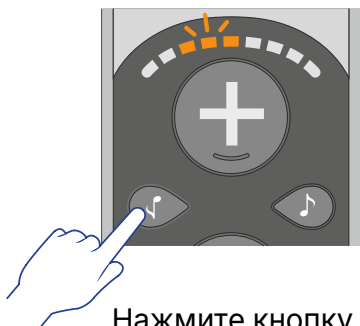


Нажмите кнопку , чтобы увеличить громкость в левом ухе.



Нажмите кнопку , чтобы увеличить громкость в правом ухе.

▶ Диапазоны громкости

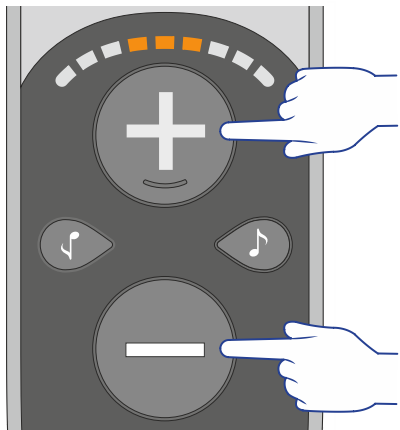

Нажмите и удерживайте кнопки [+] и [-] одновременно в течение 5 секунд, чтобы прокрутить между тремя диапазонами громкости.



Низкий

Средний

Высокий*

(по умолчанию)




** Если звук при настройке «Высокий» недостаточно громкий, выполните оценку слуха в приложении, чтобы включить дополнительное усиление. См. раздел **G**.*

ВНИМАНИЕ:

Прослушивание на высокой громкости в течение длительного времени может повредить ваш слух.

▶ Блокировка/разблокировка

Чтобы предотвратить случайное срабатывание, заблокируйте все кнопки управления, нажав и удерживая эти три кнопки одновременно в течение 5 секунд, пока **красный** светодиод не мигнет один раз.

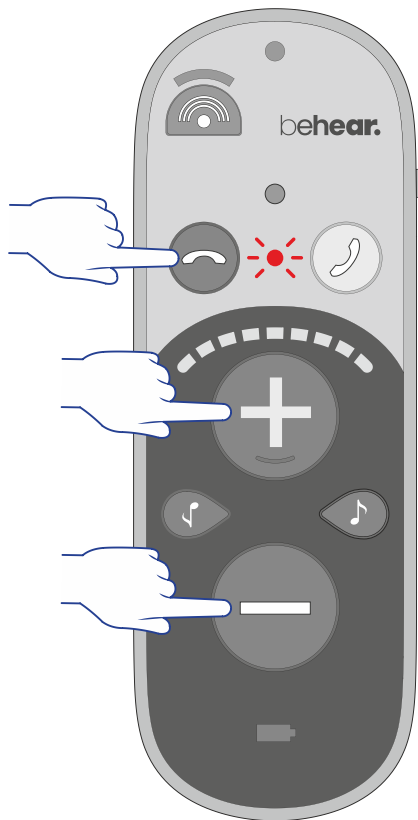

Чтобы разблокировать кнопки, повторите это действие, пока **зеленый** светодиод не мигнет один раз.

D. Аккумулятор


► Проверка уровня заряда аккумулятора




Сдвиньте кнопку питания вверх на короткое время и посмотрите на цвет светодиода аккумулятора.




Высокий
>50%

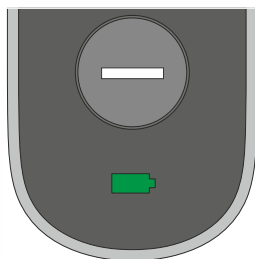


Средний
>10%

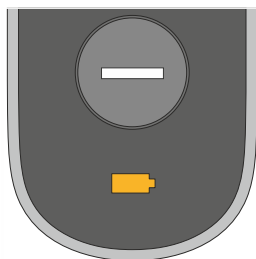

Низкий
<10%

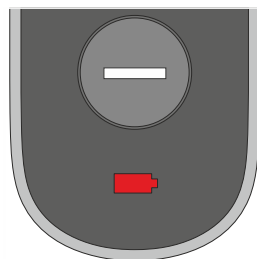

▶ Зарядка с помощью подставки

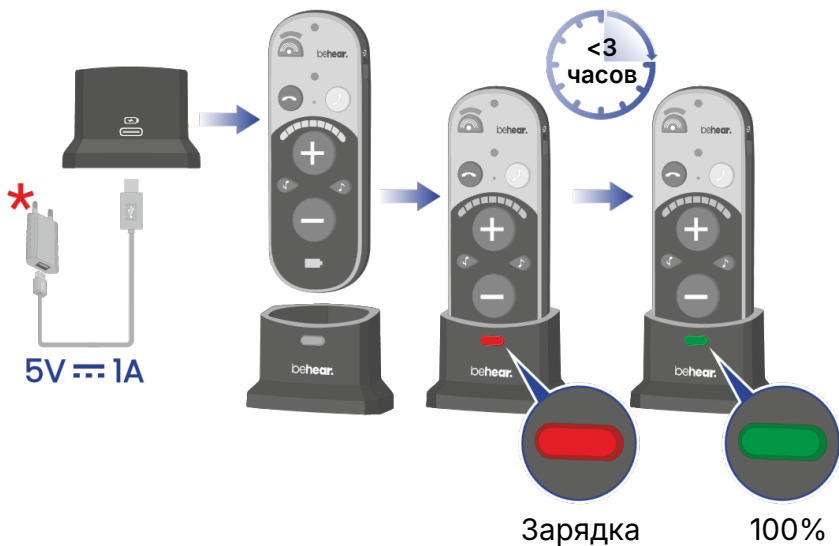

▶ Зарядка без подставки



* Блок питания приобретается отдельно

Е. Bluetooth


▶ Первое подключение



Сдвиньте переключатель питания вверх и удерживайте его, пока светодиод не начнет попеременно мигать **красным и синим**.




Выберите «BeHear SMARTO» в списке доступных устройств Bluetooth.

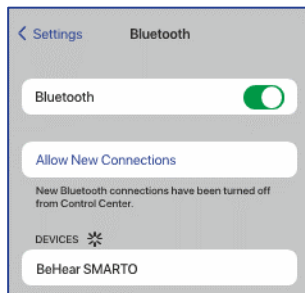


Светодиод мигает **синим** цветом, когда BeHear SMARTO подключен.

▶ Управление телефонными звонками

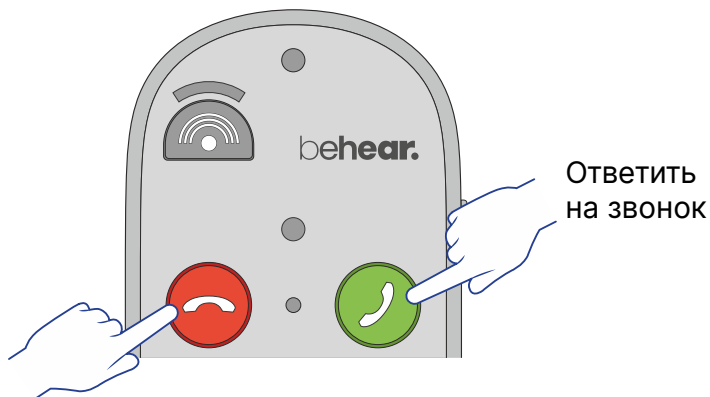

Отклонить/завершить звонок


▶ Прослушивание аудио

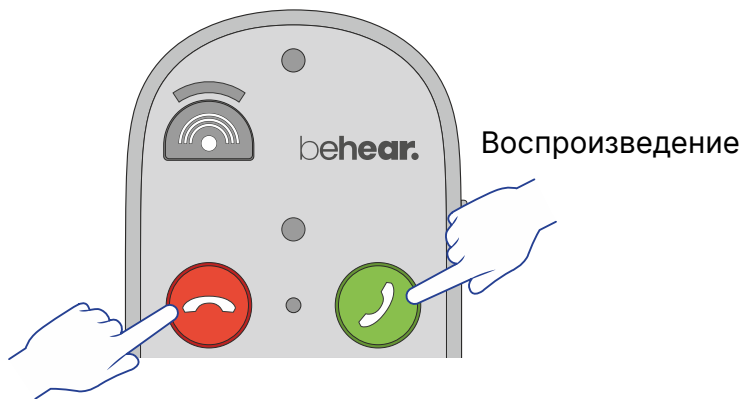

Пауза

Ф. Экстренный вызов

Используйте приложение VeHear, чтобы указать номер телефона экстренной связи для вашего SMARTO.

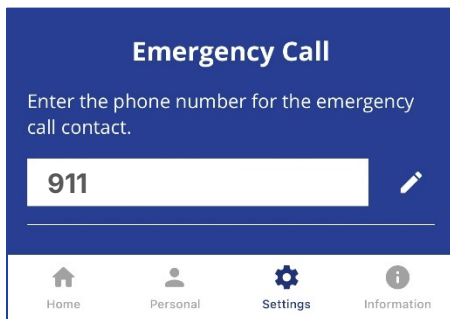

Чтобы набрать предустановленный номер телефона, нажмите Answer и удерживайте кнопку, пока светодиод не начнет мигать красным.



Требуется Bluetooth-подключение

Г. Приложение (опционально)



► Специальные функции в приложении VeHear

Маскировка тиннитуса — настройте шумовой сигнал, чтобы облегчить дискомфорт от тиннитуса. Подробности см. в разделе [I].

Замедление речи - используйте EasyListen™ для улучшения разборчивости мобильных звонков.

Настройка звука - установите уровни шумоподавления, баланс между ушами, наилучшую точку слуха и т. д.

Персональная настройка - выполните оценку слуха для индивидуального усиления на всех частотах.


Беспроводные обновления - получите новейшие функции, предоставляемые «по воздуху».

Блокировка/разблокировка кнопок - предотвратите случайное нажатие определенных функций.

Н. Персонализация (опционально)


Отрегулируйте акустические характеристики усилителя в соответствии с вашими предпочтениями.

1. Наденьте гарнитуру, которую вы хотите персонализировать.

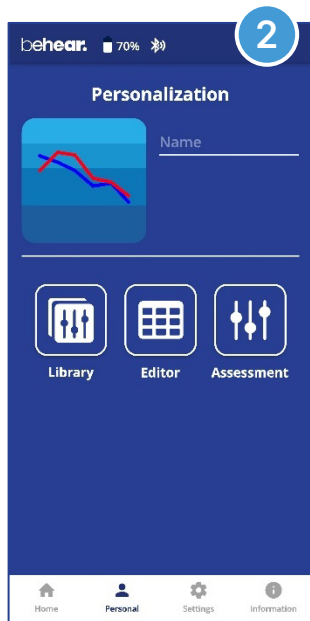


2. Выберите **Personal >> Assessment** в приложении BeHear.


3. Подтвердите, какой тип гарнитуры вы носите.

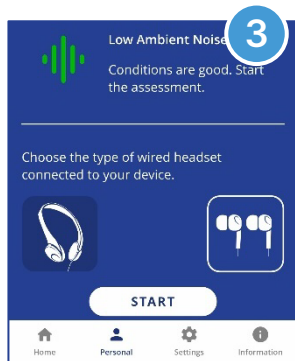

4. Следуйте подсказкам, чтобы выполнить оценку слуха.

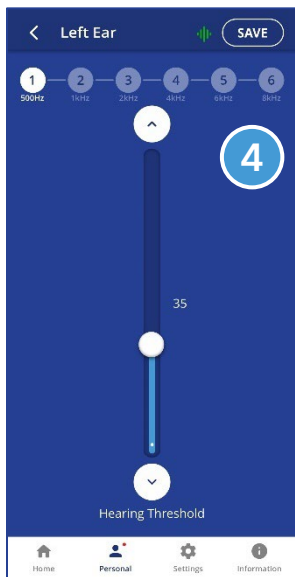



5. Сохраните и примените результаты.

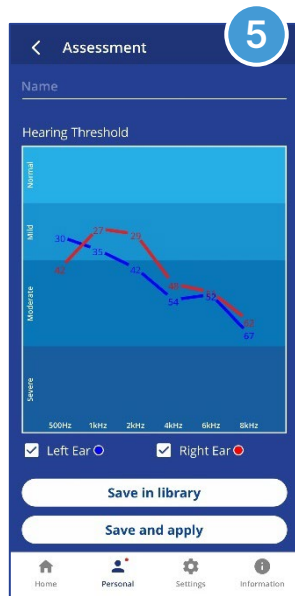

I. Маскировка тиннитуса (опционально)

Звуковая маскировка тиннитуса предназначена для облегчения дискомфорта у людей, страдающих тиннитусом.

В режиме **Personal Hearing** вы можете активировать воспроизведение маскирующего шума, чтобы отвлечься от тиннитуса.

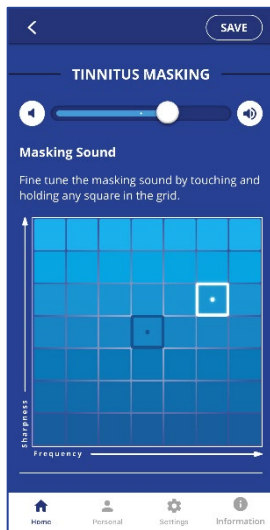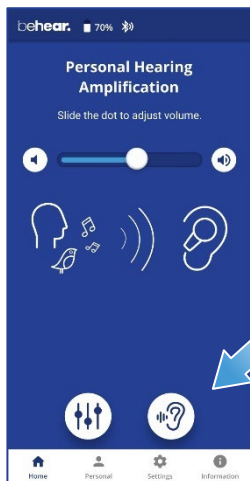

С помощью приложения **BeHear** можно настроить шум по громкости, тону, частоте, модуляции и балансу между ушами

Доступ к этим параметрам осуществляется путем нажатия значка **Tinnitus** на главном экране.

Инструкции по загрузке приложения см. в разделе [G].

Ж. Устранение неполадок

Нет звука	Убедитесь, что гарнитура подключена. Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Отрегулируйте уровень громкости.
Наушники-вкладыши неудобны	Поэкспериментируйте с различными вкладышами
Телефонные звонки и/или музыка не маршрутизируются	Проверьте подключение Bluetooth
Bluetooth часто отключается	Убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не более 10 метров от устройства Bluetooth.
Прерывания слышимости	Отключите сигналы телефона (оповещения, звуки уведомлений, нажатия клавиш и т. д.).
Непредвиденное поведение	Перезагрузите SMARTO, подключив его к зарядному устройству.

Поддержка



Видеоуроки:
<https://bit.ly/smarto-video>

Телефон поддержки:
077-3204102



support@alango-behear.com



www.alango-behear.com